



Masajeador Vibra - Pressure

Knee

Masajeador Vibra - Pressure Knee LH

Masajeador de última generación para reducir molestias en la rodilla, o para disfrutar de una sensación de descanso reconfortante y descarga tras un largo día.

El **Masajeador Vibra-Pressure Knee** tiene una sujeción perfecta para la rodilla y disfrutará de los beneficios de cada masaje gracias a sus almohadillas electrodos de fácil colocación.

El **panel de visualización** es muy intuitivo y sencillo de utilizar. Le permite acceder a todas las funciones y configurar un masaje adaptado a sus necesidades.

Podrá personalizar su masaje controlando el **grado de calor**, la intensidad de **aire en 3 niveles** (baja, media y alta), la **vibración en 3 niveles** (baja, media, alta) y 3 niveles de intensidad de **electromasaje**. No es un producto sanitario.



EL MASAJEADOR VIBRA-PRESSURE KNEE NO ES UN PRODUCTO SANITARIO.



Masajeador Vibra - Pressure

Knee



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre del producto	Masajeador Knee LH
Modelo del producto	Vibra-Pressure
Tensión del adaptador	DC 5V
Corriente de funcionamiento	2A
Tensión de entrada	AC 100-240V 50/60Hz
Potencia nominal	10W
Tiempo	15 minutos



PANTALLA DE VISUALIZACIÓN

- 1 Botón de encendido
[3 niveles de intensidad baja (L), media (M), alta (H)]
- 2 Botón de calor
- 3 Botón de aire
[3 niveles de intensidad baja (L), media (M), alta (H)]
- 4 Botón de vibración
[3 niveles de intensidad baja, media, alta]
- 5 Botón de electromasaje
[3 niveles de intensidad baja-1, media-2, alta-3]



- 1 Calor con infrarrojos con 21 luces rojas de fisio masaje
- 2 Sujeción a la rodilla
- 3 Masaje con almohadillas electrodos

3 niveles de intensidad de aire o vibración

Masaje de bienestar personalizado

3 niveles de intensidad electrotécnica

Tiempo automático 15 minutos



Masajeador Vibra - Pressure Knee LH

USOS

Masaje función calor

Active la función de calor para estimular a nivel rodilla y promover una puesta a punto más rápida y gestión de las molestias musculares.

El Masajeador Vibra-Pressure Knee realiza diferentes tipos de masajes e intensidades y se puede combinar con la función calor.

El masaje de presión, con el botón aire se aplica para profundizar en un punto de los músculos en las molestias del día a día.

Con la función vibración, notará su intensidad en varios puntos de las rodillas, para las molestias de la rodilla completa.



Pressure

CONTENIDO

Masajeador rodilla (1 unidad)

Almohadillas de gel para electrodos (2 unidades)

Cable conector (1 pieza)

Enchufe USB (1 unidad)

